

Anweisung

UM-JI-01,Rev.5
Rev. Datum: 01.07.2017

C€

1. Verwenden Sie den , um eine geeignete Spitze an den Handgriff anzubringen. Ziehen Sie die Spitze nicht zu fest an.
2. Vor der Verwendung müssen die Spitzen mit einem neutralen Spülmittel und Ultraschallreiniger gereinigt werden.
10 min. bei 134°C
* Verwenden Sie zur Sterilisation keine chemischen Mittel.
3. Während der Apikalvorgang verarbeitet wird. Greifen Sie den Handgriff, wie Sie eine Pfanne ergreifen und verwenden Sie nur ein Instrument auf einmal.

Produktbezeichnung	Zahnchirurgische Instrumente
Modellbezeichnung	J ETIP-Instrument-Grün
Vorgesehene Verwendung	Zahnchirurgischer Vorgang
Verpackungseinheit	1 Stk.



2018-09

LOT

GGJ1809001A



Vorsichtsmaßnahmen
Stellen Sie sicher vor jeder Verwendung die Spitze zu sterilisieren



EC REP
B&L Biotech, Inc. #502, 95 , Gwangdeokdong-ro,
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do,
Korea 15462



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP,
Den Haag, Holland

B&L Biotech USA, Inc.
3959 Pender Drive #350 Fairfax, VA USA 22030
Tel. (703) 272 -7507 | Fax. (703) 272-7598
www.bnlbio.com