

## Mischzeiten

Die Mischzeiten sind je nach Produkt verschieden. Da die Produkte variieren sind die nachstehenden empfohlenen Mischzeiten lediglich eine Orientierungshilfe. Die Umgebungs- sowie die Wasser-Temperaturen bei Alginaten können die Mischzeiten beeinflussen. Für Alginat-Mischungen empfehlen wir, kühles Wasser zu verwenden.

Produkt	Hersteller	Mischzeit
Blueprint Cremix	De Trey / Dentsply	12 – 14 sek.
Palgaflex	Espe	16 sek.
Palgaflex Quick	Espe	12 – 14 sek.
Tetrachrom	Kaniendenta	12 sek.
Blend-a-print	Blendamed	12 sek.
Alginoplast	Bayer	14 sek.
Xantalgin	Bayer	8 – 10 sek.
Orthalgenat	Dentaurum	14 sek.
Turboprint A / ortho	R & S	10 – 12 sek.
Zelgan 2002	De Trey / Dentsply	12 sek.
Alginmax	Major	12 sek.



**Monitex Industrial Co., LTD**  
5F, 70, Sec. 1, Guangfu Rd., Sanchong Dist.,  
New Taipei City 24158, Taiwan (R.O.C)

EC REP

**Cavex Holland BV**  
Fustweg 5, P.O. Box 852,  
2003 RW Haarlem, The  
Netherlands

## KURZANLEITUNG - ALMI 2 Mini -



## Mischzeiten

Die Mischzeiten sind je nach Produkt verschieden. Da die Produkte variieren sind die nachstehenden empfohlenen Mischzeiten lediglich eine Orientierungshilfe. Die Umgebungs- sowie die Wasser-Temperaturen bei Alginaten können die Mischzeiten beeinflussen. Für Alginat-Mischungen empfehlen wir, kühles Wasser zu verwenden.

Produkt	Hersteller	Mischzeit
Blueprint Cremix	De Trey / Dentsply	12 – 14 sek.
Palgaflex	Espe	16 sek.
Palgaflex Quick	Espe	12 – 14 sek.
Tetrachrom	Kaniendenta	12 sek.
Blend-a-print	Blendamed	12 sek.
Alginoplast	Bayer	14 sek.
Xantalgin	Bayer	8 – 10 sek.
Orthalgenat	Dentaurum	14 sek.
Turboprint A / ortho	R & S	10 – 12 sek.
Zelgan 2002	De Trey / Dentsply	12 sek.
Alginmax	Major	12 sek.



**Monitex Industrial Co., LTD**  
5F, 70, Sec. 1, Guangfu Rd., Sanchong Dist.,  
New Taipei City 24158, Taiwan (R.O.C)

EC REP

**Cavex Holland BV**  
Fustweg 5, P.O. Box 852,  
2003 RW Haarlem, The  
Netherlands

## KURZANLEITUNG - ALMI 2 Mini -



## Sicherheitshinweise

Bevor Sie den ALMI 2 Mini in Betrieb nehmen, müssen die Transportsicherungsschrauben an der Grundplatte des Gerätes entfernt werden. Für jeden Transport sind die Transportsicherungsschrauben einzusetzen.

Zur Entfernung der Transportsicherungsschrauben das Gerät an die Tischkante stellen – NICHT LEGEN ODER KIPPEN - und dann die Schrauben herausdrehen. Die Schrauben danach in die auf der Rückseite befindliche Vorrichtung einstecken.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, müssen wir jede Verantwortung ablehnen. Kontrollieren Sie bitte, ob die auf dem Typenschild des ALMI 2 Mini angegebene Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

## Technische Daten

Model:	Keydent ALMI 2 Mini
Maße (HxBxT):	290x205x250 (mm)
Gewicht:	18 KG
Elektroanschluss:	AC 220V (50Hz)
Leistungsaufnahme:	max. 230 Watt
Drehzahl:	ca. 2.900 rpm
Speicherplätze:	3 programmierbare Speicherplätze

## Sicherheitshinweise

Bevor Sie den ALMI 2 Mini in Betrieb nehmen, müssen die Transportsicherungsschrauben an der Grundplatte des Gerätes entfernt werden. Für jeden Transport sind die Transportsicherungsschrauben einzusetzen.

Zur Entfernung den ALMI 2 Mini auf den Kopf stellen und die Transportsicherungsschrauben entfernen. Den ALMI 2 Mini wieder auf die Gummifüße stellen, Deckel öffnen und die Kartonhülle entfernen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, müssen wir jede Verantwortung ablehnen. Kontrollieren Sie bitte, ob die auf dem Typenschild des ALMI 2 Mini angegebene Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

## Technische Daten

Model:	Keydent ALMI 2 Mini
Maße (HxBxT):	290x205x250 (mm)
Gewicht:	18 KG
Elektroanschluss:	AC 220V (50Hz)
Leistungsaufnahme:	max. 230 Watt
Drehzahl:	ca. 2.900 rpm
Speicherplätze:	3 programmierbare Speicherplätze

## Alginate Mischung - Kurzanleitung

1. Alginate wie vom Hersteller empfohlen (siehe auch Rückseite) abmessen und in den Mischbecher abfüllen.
2. Wassermenge mit Messbecher des Herstellers oder mit Dosierflasche abmessen und hinzufügen.
3. Gefüllten Becher kurz mit Spatel durchrühren.
4. Deckel Mischbecher mit leichter Drehung aufsetzen.
5. Mischbecher einsetzen und Deckel schließen.
6. Mischzeit auf der Skala von 1 - 16 Sek. einstellen. Alternativ: Voreingestellte Zeit über die Taste „Memory Select“ auswählen. Die 3 Speicherplätze können über gleichzeitiges Drücken der „Pfeil nach oben“ & „Pfeil nach unten“ Taste mit Zeiten von 1-16 Sek. belegt werden.
7. Drücken Sie den „Power Knopf“. Der ALMI 2 Mini mischt nun das Alginate und stellt nach der gewählten Mischdauer automatisch ab.
8. Mischbecher aus dem ALMI 2 Mini herausnehmen und den Deckel mit leichter Drehung öffnen. Mit dem Spatel kann das Alginate aus dem Mischbecher herausgehoben werden.

## Alginate Mischung - Kurzanleitung

1. Alginate wie vom Hersteller empfohlen (siehe auch Rückseite) abmessen und in den Mischbecher abfüllen.
2. Wassermenge mit Messbecher des Herstellers oder mit Dosierflasche abmessen und hinzufügen.
3. Gefüllten Becher kurz mit Spatel durchrühren.
4. Deckel Mischbecher mit leichter Drehung aufsetzen.
5. Mischbecher einsetzen und Deckel schließen.
6. Mischzeit auf der Skala von 1 - 16 Sek. einstellen. Alternativ: Voreingestellte Zeit über die Taste „Memory Select“ auswählen. Die 3 Speicherplätze können über gleichzeitiges Drücken der „Pfeil nach oben“ & „Pfeil nach unten“ Taste mit Zeiten von 1-16 Sek. belegt werden.
7. Drücken Sie den „Power Knopf“. Der ALMI 2 Mini mischt nun das Alginate und stellt nach der gewählten Mischdauer automatisch ab.
8. Mischbecher aus dem ALMI 2 Mini herausnehmen und den Deckel mit leichter Drehung öffnen. Mit dem Spatel kann das Alginate aus dem Mischbecher herausgehoben werden.