

LUCIDA

COMPOSITE GLOSS SYSTEM

PRODUCED BY
STYLE ITALIANO
& DIASHINE

VH TECHNOLOGIES LTD.
2100 196th St. SW STE 116,
Lynwood WA 98036, USA

Alsstr. 97,41063,
Monchengladbach, Germany
support@europecert.eu



FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

1. Applizieren Sie eine kleine Menge Lucida-Paste mit Hilfe eines Spatels auf die trockene Oberfläche des Zahns/Komposits.
2. Verwenden Sie nun Lucida Star (nicht drehend), um die Paste über die gesamte Zahn/Komposit-Oberfläche zu verteilen.
3. Aktivieren Sie das Filzrad ohne Wasser und mit einer Geschwindigkeit von 2.000-4.500 rpm. Führen Sie „touch & go“-Bewegungen von zervikal nach inzisal aus. Platzieren Sie den Filz ausschließlich vertikal, wenn Sie in den proximalen Bereichen polieren. Tun Sie dies für 20-40 Sekunden.
4. Verwenden Sie nun Wasser und arbeiten Sie bei voller Geschwindigkeit. Dieser Schritt ist nicht obligatorisch, eignet sich aber hervorragend zum Wegspülen der restlichen Paste.