

# KEYDENT SPIN BLADE 360

by/nach Prof. Hürzeler & Dr. Zuhr

 **AMERICAN**  
Dental Systems  
INNOVATIVE DENTALPRODUKTE

- Microsurgical blade with small and ultra-thin working end


*Mikrochirurgische Klinge mit beispiellos kleinem und ultradünnem Arbeitsende*

- Can be easily bent and rotated horizontally

*Lässt sich leicht biegen und horizontal drehen*

- Allows precise and atraumatic flap preparation, even in situations with difficult access and extremely thin soft tissue conditions

*Ermöglicht präzise und atraumatische Lappenpräparation, selbst bei schwierigen Zugängen und extrem dünnen Weichgewebsverhältnissen*

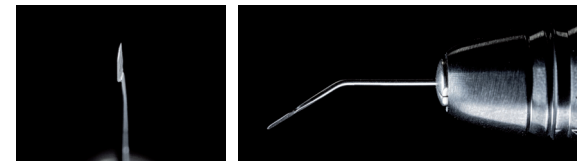

7940216

# KEYDENT SPIN BLADE 360


by/nach Prof. Hürzeler & Dr. Zuhr

Zum Video  
Keydent Spin Blade 360



## Inserting the Keydent Spin Blade 360 into the chuck of the TOUCHGRIP scalpel holder/ *Einsetzen der Keydent Spin Blade 360 in das Spannfutter des TOUCHGRIP Skalpellhalters*

### Step 1/Schritt 1

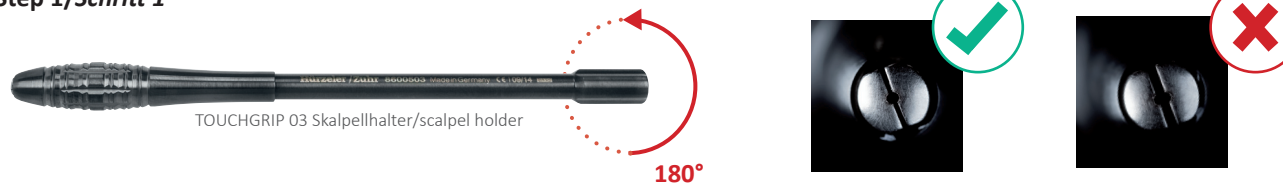

Hold the scalpel holder by the handle with one hand. With the other hand, turn the lower end of the scalpel holder by a maximum of 180° (1/2 turn) counterclockwise. This opens the chuck of the scalpel holder just enough to insert the blade safely and straight.

*Halten Sie den Skalpellhalter mit einer Hand am Griff fest. Mit der anderen Hand drehen Sie das untere Ende des Skalpellhalters um max. 180° (1/2 Drehung) gegen den Uhrzeigersinn. Damit öffnet sich das Spannfutter des Skalpellhalters genau so weit, um die Klinge sicher und gerade einzuführen.*

### Step 2/Schritt 2

Insert the cylindrical shaft of the Keydent Spin Blade 360 into the chuck. Then close the chuck again by turning the handle end clockwise until the blade is firmly seated.

*Führen Sie den zylindrischen Schaft der Keydent Spin Blade 360 in das Spannfutter ein. Schließen Sie dann das Spannfutter wieder, indem Sie das Griffende im Uhrzeigersinn drehen, bis die Klinge fest sitzt.*